
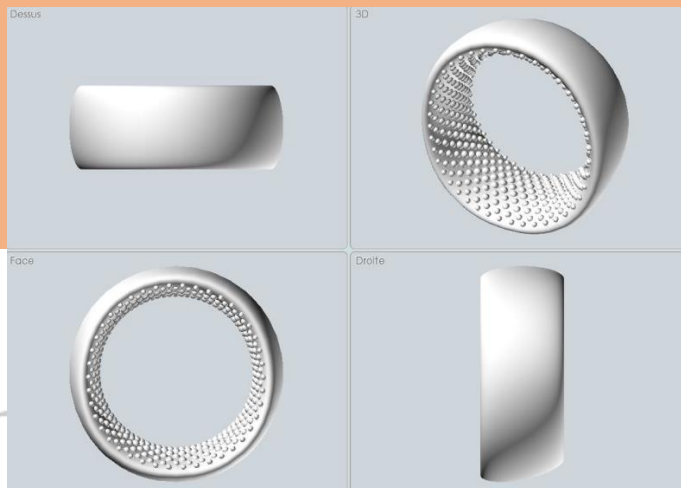


# Fiche produit ANDRO-SWITCH

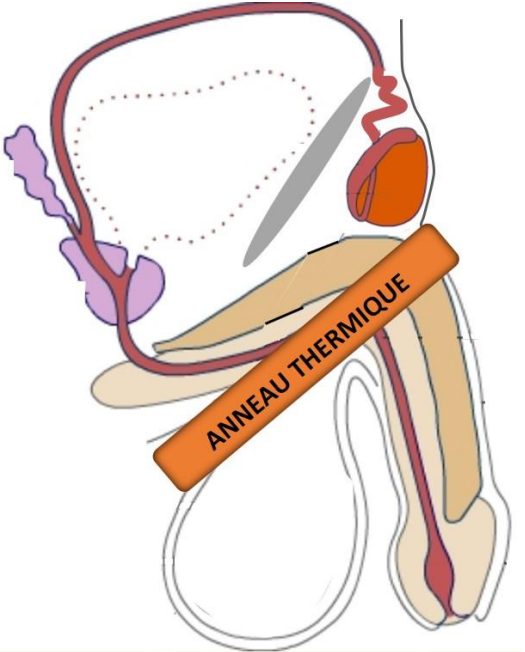

**Anneau thermique : dispositif annulaire pénoscrotal de maintien testiculaire pour la mise en œuvre du protocole de contraception thermique dite masculine (CMT) par remontée testiculaire.**




<b>Principe</b>	Spécialement conçu pour maintenir temporairement les testicules en position supra scrotale. L'élévation de la température des testicules à la température corporelle entraîne une <b>infertilité temporaire</b> et réversible.
<b>Caractéristiques</b>	Pratique d'une contraception masculine dite locale, <b>non hormonale et de longue durée</b> . Seuil contraceptif : concentration de spermatozoïdes < <b>1 million/ml</b> . <b>Efficace ; réversible ; faible coût</b> . <b>Effet push-up</b> maintenant les testicules en position haute. <b>Effets antidérapant et respirant</b> de la face interne. Ergonomique, confortable, sans risque de striction du pénis. Non stérile, réutilisable, à <b>usage individuel</b> . 5 tailles disponibles.
<b>Matière</b>	100% silicone à catalyse platine, <b>certifié biocompatible ISO 10993-10</b> Skin Safe, souple et testé cliniquement pour du contact cutané prolongé. <b>Hypoallergénique</b> , sans latex, colorants, BPA, phtalate, plastique, agents de blanchiment, ou toxines.
<b>Indications</b>	Toute personne désirant pratiquer la CMT, <b>avec accord du médecin traitant</b> . Il peut être utilisé dans le cadre du bien-être.
<b>Effets secondaires</b>	La CMT n'est pas un processus instantané, l'infertilité comme le retour à la fertilité demandent un délai de plusieurs mois. Aucun effet indésirable n'est survenu au cours du port de dispositif annulaire. Risque de démangeaisons (contact prolongé du dispositif et de la peau). Arrêtez son utilisation si vous ressentez une douleur ou un inconfort et parlez-en à votre médecin ou votre pharmacien.
<b>Mise en place</b>	<b>Introduisez le pénis</b> dans l'anneau thermique. <b>Glissez ensuite doucement la peau du scrotum</b> pour la faire passer totalement à l'intérieur de dispositif. Par manque de place, les <b>testicules</b> vont alors <b>remonter naturellement dans la poche inguinale</b> à la racine de la verge.

	<p>Vérifier que les testicules se trouvent dans la poche inguinale par une légère palpation.</p> <p>Peut être recouvert d'un sous-vêtement classique.</p> <p>Peut être installé ou retiré dans n'importe quelle position.</p> <p>La mise en place, le port ou le retrait du dispositif ne nécessite pas l'utilisation d'un lubrifiant.</p> <p>Vous pouvez uriner, avoir des rapports sexuels, des érections, ou encore pratiquer les gestes de la vie quotidienne et professionnelle comme à votre habitude.</p>	
<p><b>Hygiène &amp; Conservation</b></p>	<p>Nettoyez le produit avant et après chaque utilisation à l'eau tiède avec un <b>savon doux</b>.</p> <p>Utiliser uniquement un lubrifiant à base d'eau.</p>	
<p><b>Durée de port</b></p>	<p><b>15h quotidiennes</b> / maximum 4 années consécutives de contraception</p>	
<p><b>Contre-indications</b></p>	<p>Toute anomalie au niveau de l'aîne du pubis, de la verge, de l'aîne et des testicules ; hernie inguinale ; Cancer du testicule ; Diminution de la force des mains ; obésité ; Infections cutanées locales de la zone de la verge, du scrotum, de l'aîne et du pubis ; Dermate de contact de la zone de la verge, du scrotum, de l'aîne et du pubis ; Œdème de la verge.</p>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ni la CMT, ni le port de dispositif annulaire ne permet d'offrir la moindre protection contre la transmission de maladies (MST) ou infections (IST) pour lesquelles seul le préservatif est efficace.</li> <li>• Avant d'utiliser ce produit, consultez votre médecin traitant.</li> <li>• Veillez à toujours porter le dispositif annulaire en suivant exactement les indications du protocole de la CMT et celles de votre médecin. Vérifiez auprès de votre médecin ou pharmacien en cas de doute.</li> </ul>		

<https://thoreme.com>

FB : [slow.contraception](https://www.facebook.com/slow.contraception)

[contact@thoreme.fr](mailto:contact@thoreme.fr)

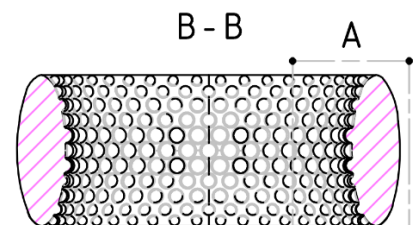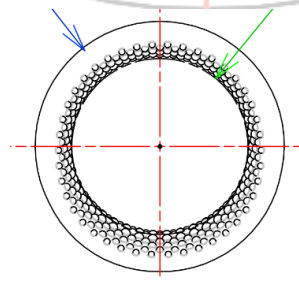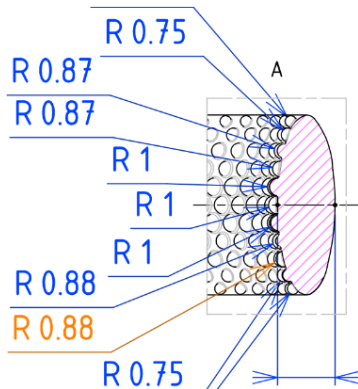

**ANDRO SWITCH**